トイレスタンバー」 型番SBT-01 取扱説明書

はじめにお読みください



1.梱包品をご確認ください



粘着固定マット(プロセブン)(4枚) $5 \text{cm} \times 5 \text{cm}$



本体 「トイレスタンバー」型番SBT-01

2.設置方法


(1) 付属の「粘着固定マット(プロセブン)」を 表面シートをはがしてスタンバーの底板裏面、 図のように貼ります。



2 スタンバーを使用個所に軽く置き、 位置を調整します。



(3) 上から押さえて圧着して下さい。

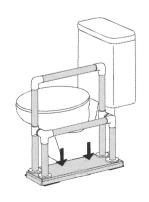

※粘着固定マットの 粘着力は強力です。クッションフロア や合板など製品強度が弱い場合、破損する可能性があり ます。また、設置面の塗装が弱い場合は塗装がはげる場合 があります。設置面床材の製品強度が弱い場合は床材が 破損する可能性があります。粘着固定マットの使用に 関して発生した破損などの事故などに対しては一切 責任を負う事が出来ません。

< 取外し時は、設置物をゆっくりひねりながら外して下さい>

スタンバーは 横から力を加えると転倒する恐れがあります。

上から押さえるようにご使用ください。




「自在設置手すり

使用上のご注意


使用上の注意をお守りの上、安全にご使用ください。

力の掛け方

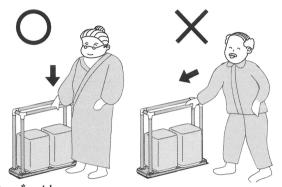

スタンバーは 水タンク、粘着固定マット(プロセブン)使用時ともに 横から力を加えると転倒する恐れがあります 上から押さえるようにご使用ください。

設置の仕方

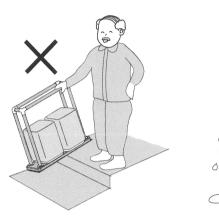



スタンバーは移動できますが、段差のあるところ でのご使用はおやめください。また凹凸のある 床面、斜面、水に濡れる外部や浴室、高温多湿 の場所でのご使用はおやめください。

日常のご注意



歩行の妨げになりますので スタンバーの上に物を置いたり 掛けたりしないでください。





小さなお子様が スタンバーで遊んだり しないようにしてください。





不当な修理・分解・改造は しないようにしてください。

これらの使用上のご注意をお守りいただけなかった場合は、安全性に関して当社では責任を負いかねますので、 その旨をご了承ください。

ご注意:本製品及び本書はミライズ株式会社の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で **株式会社** 複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。



SBR-05·SBT-01 共通

取外し時にお読みください



粘着固定マット(プロセブン)取外し方法


(**1**) スタンバーを取外す場合「粘着固定マット(プロセブン)」と設置物の間に空気が入ると はがれやすくなります。

先にスタンバーと粘着固定マットの間を取外し、 次に、粘着固定マットを はがしとるほうが床に傷がつきません。

(プロセブンホームページの取外し方も参考にご覧ください) http://www.pro-7.co.jp/product/manual/)

(**2**) まずスタンバーを上部後方に持ち上げるようにしながら水で濡らしたプラスチックのへら などをマットとスタンバーの間に入れ、徐々に空気を入れていく要領でゆっくり取外して下さい。 (一人では難しいので安全のため二人以上で作業してください。)



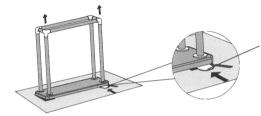

水で濡らしたプラスチック製へら等

(3) 床に残った粘着固定マットをゆっくり上に引き上げるようにはがします。 このとき互いにマット同士がくっついてしまうと引きはがしにくく、 再利用が難しくなります。


ほこり等がついて粘着力が弱くなってきたときには水洗いをすると回復します。

屋内使用時耐久性・・・約5~7年(メーカー公表値)



⚠️ 設置面の塗装等が弱い場合は、塗装がはげる事があります。 設置面床材の製品強度が弱い場合は床材が破損する可能性があります。 粘着固定マットの使用に関して発生した破損などの事故などに対しては♪ 一切責任を負う事が出来ません。

別売りで空気圧式マット取外し具もございます。 (取外し具を差し込むために粘着マット間に20cm程度の隙間を 残しておく必要があります。)

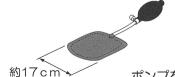

ポンプを押して袋に空気を入れてスタンバーを浮かせます



ご注意:本製品及び本書はミライズ株式会社の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で **またり** 株式会社 複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。